

検体の採取方法

① 検体の送付ができる日に採取をします

検体は採取したその日のご送付が望ましいので、採取～送付までの時間の余裕がある時に行ってください。

髪の毛が乾いている時で、整髪料など何もついていない状態で行います。
朝起きて整髪する前の状態などが適しています。

※その他わき毛、陰毛、乳毛など他の毛の毛根での検査も可能ですが、毛根付きで2～3cm必要です。



② 髪を3本 毛根ごと抜きます

毛根が残っている髪が3本必要です。
1本ずつ丁寧に抜いてください。

抜いた後に毛根が残っているかご確認ください。
また、抜いた髪の毛根部分には触らないでください。


※ブラシに付いた髪は検体には使えません。



③ 抜いた毛髪を 2～3cm程度に カットします

抜いた毛髪の毛根部分を含め2～3cm程度にハサミでカットしてください。

※毛根部分に触らないようにご注意ください。

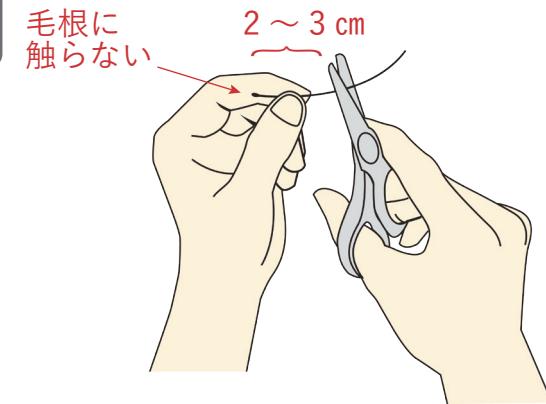

④ 毛髪を 検体容器に 入れます

検体容器のキャップを開け、毛髪の毛根を下に向けて入れてキャップをしっかりと閉めてください。

※容器の中に水滴など不純物が入らないようにご注意ください。

